

# FÜLDOKI

Terápiás fülmasszírozó

**A FülDoki biztonságos, egyszerűen használható eszköz, külső alkalmazásra. A fülfájás okát szünteti meg, nem csak a tüneteket.**


**A FülDoki** elősegíti a lerakódott váladék és levegő távozását a fülkürtből. Gyermekek és felnőttek egyaránt használhatják. Búvárkodás és repülés közben kialakult hasonló problémák esetén is megoldást nyújt. Gyógyszerek nélkül csökkenti a nyomást a dobhártyánál, lehetővé téve a váladék távozását, azonnali enyhülést adva.

**Így működik a FülDoki:** rezgéshullámokat kelt és továbbít a koponyaacsontokon keresztül a fülkürt felé, melyek hatására a fülkürt non-invazív módon és gyógyszermentesen megnyílik, szabad utat engedve a váladék és a levegő számára. A FülDoki működését bemutató videó megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: [www.fuldoki.hu](http://www.fuldoki.hu).


**A FülDoki biztonságosan és egyszerűen alkalmazható az alábbi esetekben:**

- Középfülgyulladás
- A középfülben rekedt folyadék és levegő
- Rossz fülkürtfunkció
- Repülőgépen felszállás és landolás közben
- Búvárkodás, úszás után

## A FülDoki használata előtt

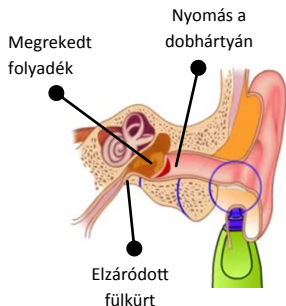


## A FülDoki használata után

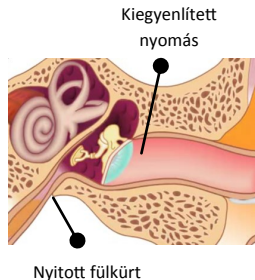


### Így használja a FülDokit:

1. A (+) és a (-) jelzések figyelembevételével helyezze be a 2 db AA méretű elemet.
2. A felső gomb megnyomásával kapcsolja be a FülDokit. A LED világítani kezd.
3. A felső gomb ismételt megnyomásával a rezgésszám növelhető. 6 fokozat érhető el.
4. A kép szerint helyezze a FülDokit a füle mögé.
5. A gombok segítségével állítsa be a kívánt erősséget.
6. Használat után kapcsolja ki a FülDokit az alsó gomb többszöri megnyomásával, amíg a rezgés abbamarad, és a LED kialszik.

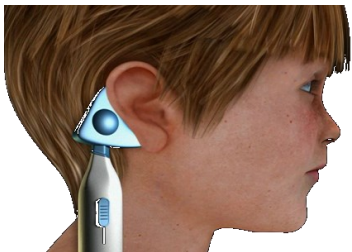

## A FülDokit használók rendkívül elégedettek!

600 megkérdezettből 94% arról számolt be, hogy a megvásárolt FülDokival sikerült panaszainak enyhítése. 98%-uk újra használná a FülDokit középfül panaszai megelőzésére és kezelésére.

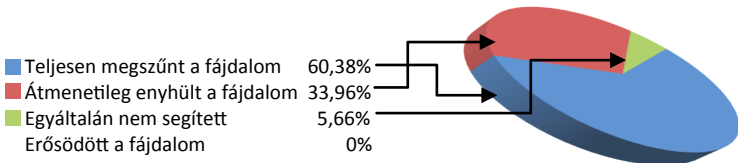

## Garancia és szerviz

A garanciális időtartam 1 év. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, szándékos vagy véletlen rongálásból, nem szakszerviz általi javítási kísérletből eredő meghibásodásokra. A garancia érvényesítéséhez szükséges a jótállási jegy és a vásárlást igazoló nyugta bemutatása.

Garanciális és azon túli szerviz igényével kérjük, forduljon a Forgalmazóhoz a vásárlás helyén.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó neve: .....

Vásárlás helye: .....

Vásárlás időpontja: .....

## Fontos biztonsági információk, figyelmeztetések

- A FülDokit csak rendeltetésszerűen, és a fentiekben leírt módon, fülfájás megszüntetésére alkalmazza.
  - 6 év alatti gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják az eszközt.
  - Vízben használni tilos.
  - Javasolt a készüléket ülve alkalmazni.
  - Egy évesnél fiatalabb gyermekeknél nem használható a FülDoki.
  - A FülDoki nem helyettesíti az orvosi, illetve gyógyszeres kezelést.
  - Amennyiben a fájdalom nem szűnik meg, forduljon orvoshoz.
- 
- További információkért
  - A FülDokit használók beszámolóinak meghallgatásához
  - És a FülDoki működésének megtekintéséhez

Látogassa meg honlapunkat: [www.fuldoki.hu](http://www.fuldoki.hu)

Kérdése vagy véleménye van?

Írjon nekünk: [info@fuldoki.hu](mailto:info@fuldoki.hu)

# FÜLDOKI

**Terápiás fülmasszírozó**